

Uputa za uporabu

NOSI[®] set aspirator za nos

Poštovani korisnici,

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu uputu, jer sadrži informacije na koje morate obratiti pozornost tijekom uporabe NOSI[®] set aspiratora za nos. U slučaju nejasnoća obratite se liječniku ili ljekarniku.

Što je NOSI[®] set aspirator?

NOSI[®] set aspirator je uređaj kojim se učinkovito uklanja sekret iz nosa djeteta radi lakšeg disanja i sprječavanja nastanka komplikacija.

Zašto je važno ukloniti nosni sekret?

Novorođena djeca dišu kroz nos od trenutka svojeg rođenja, pa neuklonjeni nosni sekret može uzrokovati probleme s hranjenjem.

Ako se ne ukloni inficirani nosni sekret, može doći do komplikacija poput upala u maksilarnim sinusima, srednjem uhu ili upale tonzila.

Inficirani sekret može dospjeti u dio dišnog sustava te grlo. Progutani sekret može uzrokovati bol u želucu, povraćanje, dijareju te gastritis u djeteta.

U ozbiljnim slučajevima, oteknuće nazalne mukozne membrane smeta ventilaciji ušnog kanala koji je povezan s nosom. To objašnjava kasniju pojavu poremećaja sluha kao komplikaciju nastalu od jednostavnog početnog šmrcanja.

Redovitom higijenom nosne šupljine sve te komplikacije i problemi mogu se spriječiti.

Od koje dobi se može koristiti NOSI[®] set?

Starija djeca sposobna su ispuhati nos, no dojenčad i djeca do navršene druge godine nisu.

Dojenčad i djeca do 6 mjeseci mogu disati samo kroz nos, pa ukoliko su u tome spriječeni, može doći do ozbiljnih poremećaja disanja. To i kod starije djece uzrokuje neugodu.

NOSI[®] set se može koristiti u dojenčadi, male djece kao i u odraslih.

Dodatni oprez pri korištenju ovog uređaja potreban je u slučaju postojanja ranica u nosu i također ako je dijete sklono čestim krvarenjima iz nosa ili ima kroničnu hemofiliju.

Zašto NOSI[®] set vakumski aspirator za nos?

NOSI[®] set se temelji na najučinkovitijoj tehnologiji vakumskog čistača (usisavača).

Ne sadrži BPA (bisfenol A).

Njegova struktura idealna je za dojenčad i malu djecu.

Brzo i učinkovito uklanja sekret iz nosne šupljine.

Pod kojim pritiskom radi NOSI[®] set?

NOSI[®] set uklanja sekret stalnim, stabilnim pritiskom od 0,02 bara neovisno o namještenoj jačini usisavanja na vakumskom čistaču.


Što sadrži NOSI[®] set

NOSI[®] set sadrži dva nastavka za čišćenje (za djecu od 0 do 6 mjeseci i djecu iznad 6 mjeseci starosti) te četkicu za čišćenje nastavka.


Kako se čisti NOSI[®] set?

NOSI[®] set se može rastaviti, pa je vrlo jednostavan za čišćenje.


Kako se primjenjuje NOSI[®] set?

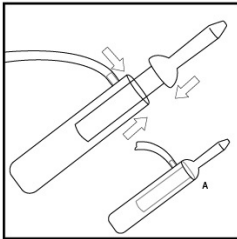


1. Spojiti dijelove aspiratora

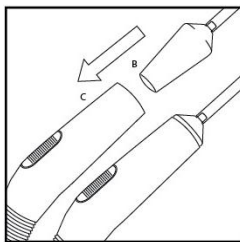


2. Širi nastavak aspiratora (B) spojiti na cijev vakumskog čistača (C)

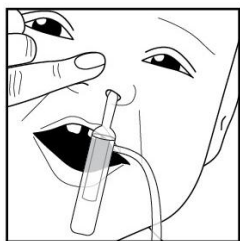

3. Zatvoriti jednu nosnicu djeteta, a u drugu staviti uži nastavak aspiratora (A) uz već uključeni vakumski čistač

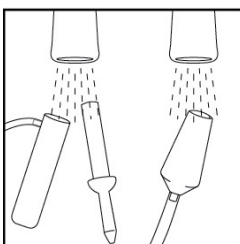

4. Rastaviti dijelove aspiratora i oprati pod mlazom vrele vode

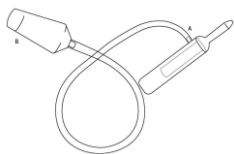

Preporuča se tijekom usisavanja sekreta vršak aspiratora staviti sa strane nosne šupljine, položeno prema dolje jer se sekret zbog svoje težine sakuplja u dnu nosne šupljine. Korisnika ne treba ostaviti bez nadzora.

Može li NOSI® set izazvati oštećenje sluznice nosa?

Snaga usisavanja ne uzrokuje oštećenje nosne mukozne membrane.

Dugogodišnje iskustvo dokazuje da dnevno korištenje nosnog vakumskog čistača pomaže odstranjivanju sekreta iz nosne šupljine, tako da se bebe i mala djeca mogu bez problema dojiti i hraniti te mirno spavati.

Nositelj odobrenja

SALVEO d.o.o.
Zavrtnica 17, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

RANYÁK GYÖRGY Üvegtechnika
Budimpešta, Mađarska
za Ceumed Kft.
Budimpešta, Mađarska

Klasa rješenja: UP/I-530-09/10-05/772